




ARMSURE

Dit ideale systeem voor armmobilisatie beschermt het steriele veld met als bijkomend voordeel dat ook de verstrooiingsstraling wordt verminderd.

ARMSURE

Dit ideale systeem voor armimmobilisatie beschermt het steriele veld met als bijkomend voordeel dat ook de verstrooiingsstraling wordt verminderd.

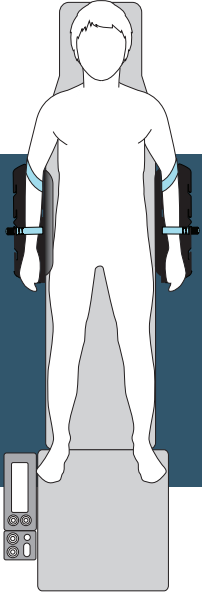

De ArmSure is bijzonder nuttig bij het toenemend aantal procedures die onder bewuste sedatie worden uitgevoerd en waarbij onrust bij de patiënt een probleem kan zijn. Het optionele IR Shield biedt de arts meer veiligheid door extra bescherming tegen verstrooiingsstraling.



De ArmSure voorkomt dat een onrustige patiënt de steriele toegangsplaats op het dijbeen in gevaar brengt terwijl hij of zij de onderarm uitstrekt tijdens de procedure voor een infuuslijn, anesthesie, enz. De ArmSure zet beide armen van een patiënt in rugligging zonder te veel druk vast in een comfortabele adductiepositie met zachte, gemakkelijk te installeren, verstelbare riemen. Door het unieke ontwerp zitten de riemen niet te strak en blijven de armen van de patiënt goed vastzitten. Dit is veel comfortabeler voor de patiënt.

Het ergonomische ontwerp ondersteunt de armen van de patiënt op comfortabele wijze op een optimale hoogte, past op alle labtafelmodellen, werkt aan beide kanten van de beeldvormingstafel en is geschikt voor diverse maten van patiënten.



ArmSure + Shield
0,5 mm lood (Pb)



ArmSure



Efficiënte installatie

Het gebruik van de ArmSure is efficiënt, snel en herhaalbaar, omdat deze door één persoon kan worden bevestigd en de conventionele methode met handdoek en laken onder de arm vervangt. Het werkt ook met gewone gelkussens voor extra comfort voor de patiënt.

De ArmSure wordt onder de steriele afdekdoek gelegd en is gemakkelijk te reinigen. Er zijn hoogwaardige kunststoffen gebruikt voor een uitstekende weerstand tegen chemische aantasting door schoonmaakmiddelen. De riemen zijn gemaakt van een zacht, duurzaam polyurethaan en zijn gemakkelijk te reinigen.

ArmSure

De ArmSure is de ideale immobiliserende armsteun, die zonder het extra X-Ray Shield dicht bij de beeldvormingstafel kan worden geschoven om ruimte vrij te maken voor de C-Arm en artsen die liever dicht bij de patiënt werken.




Belangrijkste kenmerken en voordelen


- | Zet de arm vast zonder te veel druk
- | Bescherm het steriele veld
- | Zachte plooibare riemen
- | Snelle installatie
- | Comfort voor de patiënt
- | Optionele X-Ray Shield
- | Past op alle tafels
- | Ontworpen door en voor artsen

Specificaties

ArmSure + Shield (AM0610)

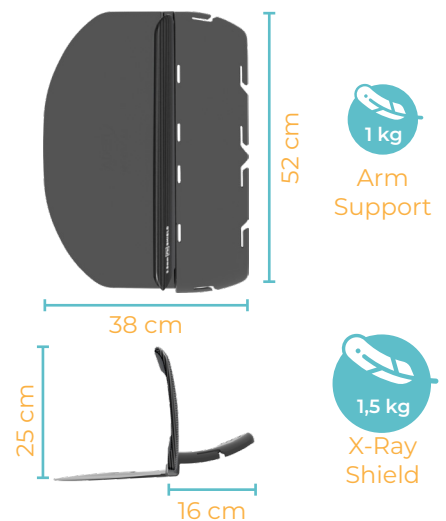

ArmSure (AM0640)

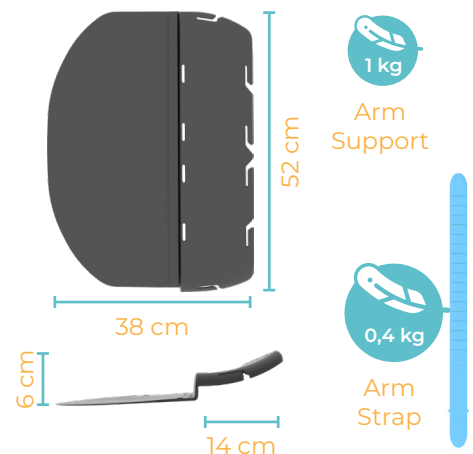




ArmSure + Shield 0,5 mm lood (Pb)


De ArmSure + Shield is de ideale immobiliserende armsteun, met extra bescherming tegen verstrooiingsstraling dankzij een röntgenstralingsschild met 0,5 mm lood (Pb), omsloten door koolstofvezel.



Volledig
strooiingsrapport

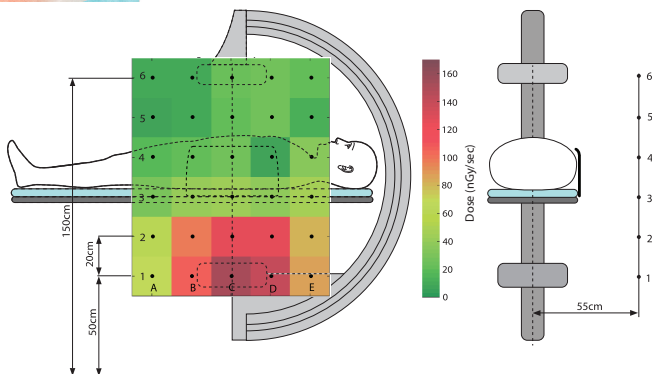


Operator dosis zonder portaalkanteling - met scherm

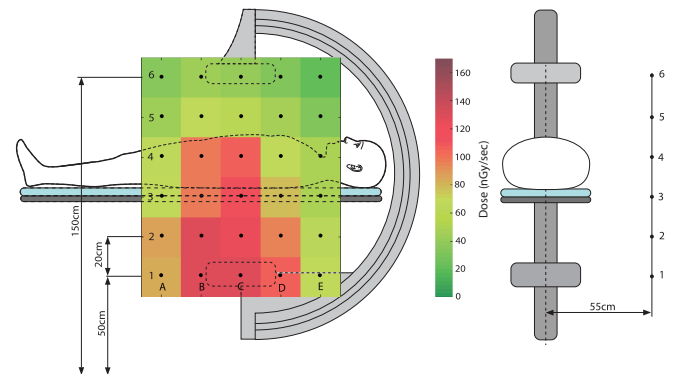

Operator dosis zonder portaalkanteling - zonder scherm

Toepassingen

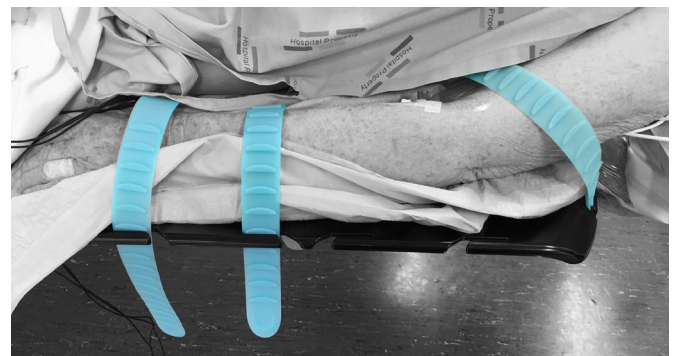

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele
radiologie



Perifere
interventie



Interventionele
cardiologie



Algemeen
chirurgisch



Interventionele
neuroradiologie



Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland