




HEAD IMMOBILISER


Om het hoofd van een patiënt stevig te ondersteunen tijdens interventionele neuroradiologische procedures.

HEAD IMMOBILISER


Een radiolucente, veilige en comfortabele hoofdsteun voor beeldgeleide procedures in interventionele radiologie en neuroradiologie.

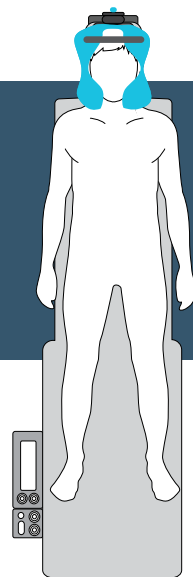

De Adept Medical Head Immobiliser is de ideale radiolucente steun voor beeldgeleide procedures op en rond het hoofd van de patiënt. Deze ondersteunt, fixeert en positioneert het hoofd comfortabel voor een reeks klinische toepassingen.

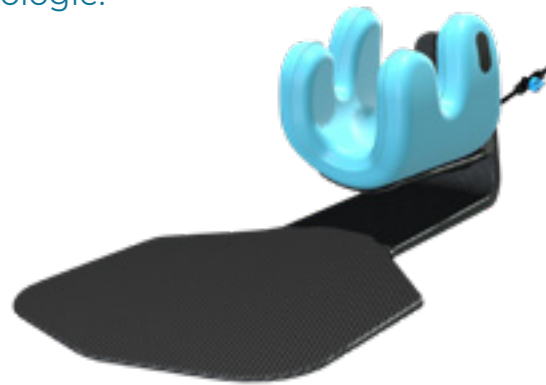


De Head Immobiliser is ontworpen om duidelijke beeldresultaten te helpen produceren, biedt een radiolucente oplossing voor comfortabele hoofdpositionering en snelle immobilisatie via een vacuümzuigsysteem en past op typische angiografie- en CT-beeldvormingstafels.

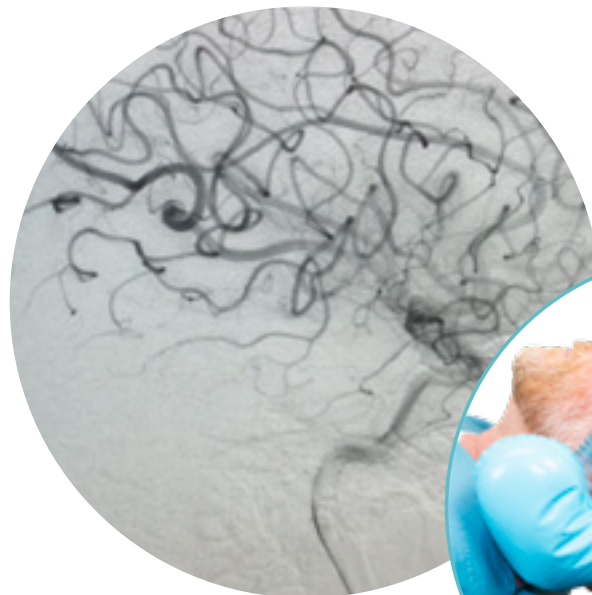

Flexibele en verstelbare hood

De flexibele hood kan worden gebruikt voor verschillende hoofdvormen en -maten. Deze kan comfortabel om het hoofd van de patiënt worden gewikkeld en worden vastgezet door vacuümzuiging.

Dankzij de hoogte- en rotatiebeweging kan de patiënt optimaal worden gepositioneerd voor de beeldvorming, met instelbaar comfort, controle en stabiliteit tijdens de gehele behandeling.

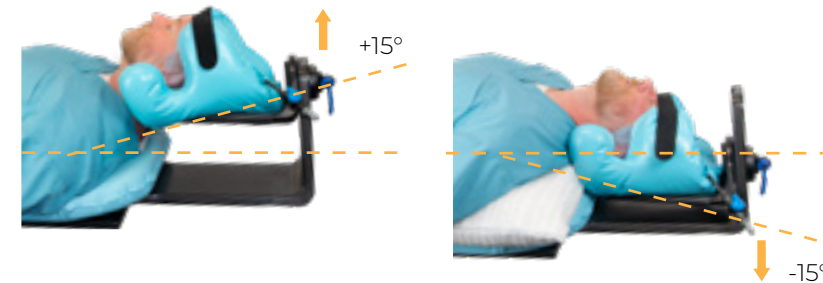

De nek kan ook worden gebogen en gestrekt door de hoofdsteun op het hoogste of het laagste punt in te stellen. De nek kan beter strekken door een kussen te gebruiken.




Eenvoudige installatie

De Head Immobiliser kan gemakkelijk onder de matras worden geplaatst op elke standaard of neuroradiologische beeldvormingstafel. Deze wordt op zijn plaats gehouden door het gewicht van de patiënt.

Immobilisatie in seconden

De patiënt kan in enkele seconden worden geïmmobiliseerd met behulp van de gewone wandzuigslang die in de meeste laboratoria wordt gebruikt en blijft geëvacueerd gedurende de hele procedure.

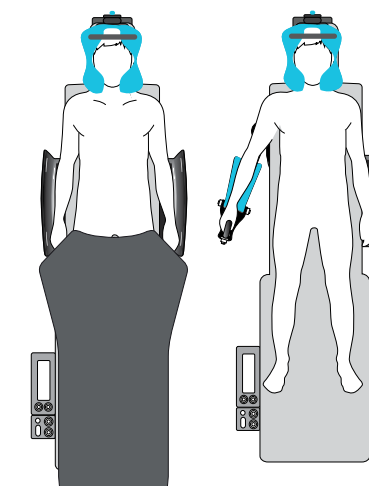

Productconfiguratie

De Head Immobiliser kan worden gebruikt in combinatie met onze STARSystem, Retrograde IR Platform en Adducted Arm Scoop voor een complete oplossing voor interventionele neuroradiologie.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Compatibel met typische angiografie- en CT-beeldvormingstafels
- Röntgendoorschijnend
- Gemakkelijk in hoogte en rotatie te verstellen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Neemt minimale ruimte in rond de operatietafel

Specificaties






*De in hoogte verstelbare hoofdsteun heeft een verticaal bereik van 115 mm.



Toepassingen

- CT-geleide injectieprocedures voor cervicale zenuwwortel
- Hersenangiografieën
- Mechanische endovasculaire interventie (trombectomie, angioplastie en revascularisatie en verwijdering van stents).
- Neurobeeldvorming - angiografie of CT
- Intraveneuze fibrinolyse (stolseloplossende therapie)
- Niet-vasculaire beeldvorming en interventie

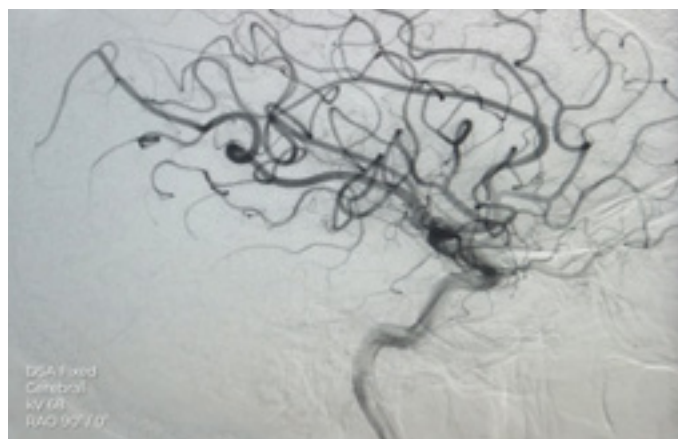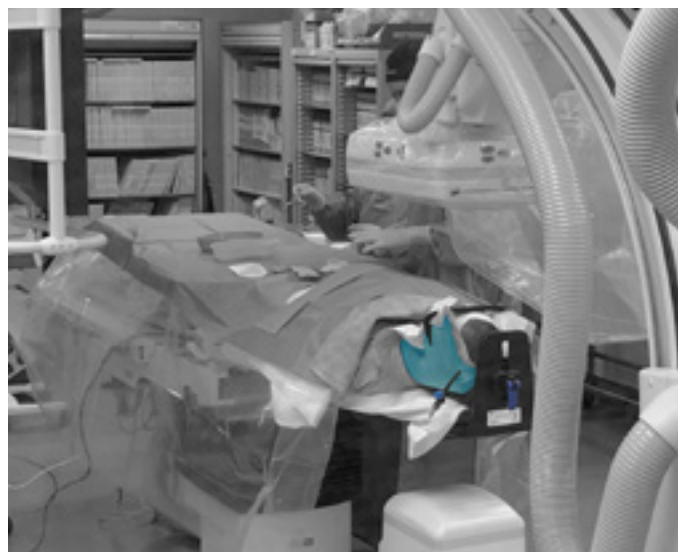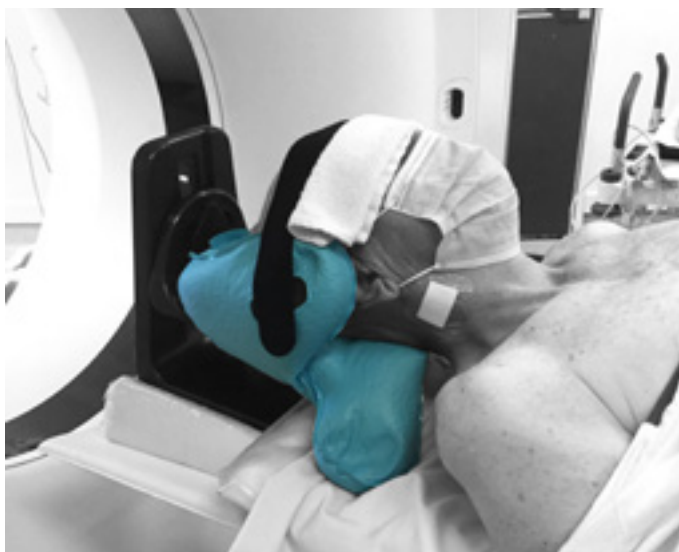

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele radiologie



Interventionele neuroradiologie



Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland