



IR SYSTEM

Het IR System bestaat uit het STARBoard, de Extension Tray en het IR Shield en vormt een complete, klinisch ontworpen oplossing voor toegang tot de linker radiale zijde.

IR SYSTEM

Het IR System bestaat uit het STARBoard, de Extension Tray en het IR Shield en vormt een complete, klinisch ontworpen oplossing voor toegang tot de linker radiale zijde.



Het IR System vergemakkelijkt de radiale toegang tijdens interventionele radiologische procedures, terwijl het optimaal comfort biedt voor de patiënt en een superieure bescherming van de gebruiker.



Het IR System is ontworpen voor gebruik met elke tafel voor radiologische procedures en kan snel worden geïnstalleerd en aangepast aan de maat van de patiënt. De installatie is in een paar seconden klaar en er zijn geen verbruiksartikelen nodig.



STARBoard


De STARBoard maakt een snelle, doeltreffende presentatie mogelijk en maakt de procedure mogelijk voor zowel distale als proximale radiale toegang.

Een van de belangrijkste functies van de STARBoard is de pols van de patiënt in een uiterste uitgestrekte positie te houden terwijl toegang wordt verkregen, en deze weer terug te brengen in een meer ontspannen, mediaal gedraaide positie tijdens de procedure. Dit is comfortabeler voor de patiënt.

De volledig scharnierende armsteun past zich aan alle maten en fysiologieën van de patiënt aan in elke armpositie. De arm hoeft niet te worden losgemaakt om te verstellen. Hierdoor kan de arts overal tijdens de procedure staan met volledig comfort voor de patiënt.

Met de verstelbare kegelwrijvingslagers en schuifkoppelingen kunnen de onderdelen draaien en schuiven en toch op hun plaats blijven in de ingestelde posities.

De STARBoard is gemaakt van koolstofvezel voor superieure sterkte, radiolucentie en duurzaamheid, en is uiterst licht en compact.

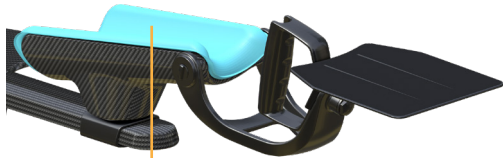

Arm Support Pad

De Arm Support Pad is een op maat gemaakte oplossing voor de drukbeheersing van patiënten. De Arm Support Pad heeft een kern van visco-elastisch geheugenschuim en is afneembaar, duurzaam, gemakkelijk te reinigen en meer radiolucent in vergelijking met de gebruikelijke gelkussens.



Extension Tray

De Extension Tray kan worden vastgeklemd en brengt uw geleidingsdraad over van de radiale toegangsplaats naar uw trolley onder de afdekdoek en biedt tevens een stabiel werkoppervlak voor draadmanipulatie.




Volledig
strooistralingsrapport

[adeptmedicaltraining.com
/scatterradiation](https://adeptmedicaltraining.com/scatterradiation)




IR Shield 0,5 mm lood (Pb)

Het verticale scherm biedt bescherming tegen röntgenverstrooiingsstraling.

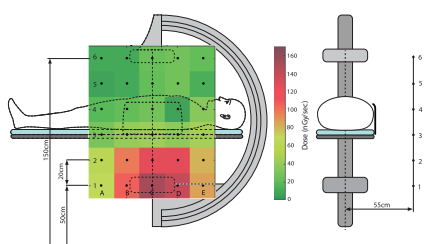

Operator dosis zonder
portaalkanteling - met scherm

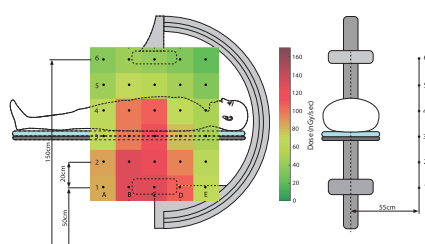


Operator dosis zonder
portaalkanteling - zonder scherm

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- | Snelle installatie
- | Eenvoudige positionering
- | Comfort voor de patiënt
- | Bescherming tegen verstrooiingsstraling
- | Past op alle tafels
- | Röntgendoorschijnend

Specificaties

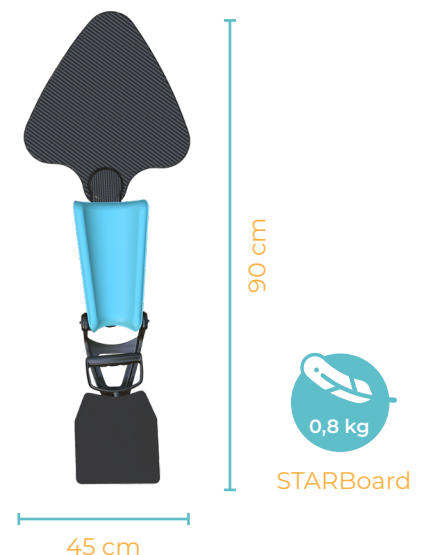

Toepassingen

Interventionele radiologie

- Vasculaire procedures via de radiale methode

Interventionele cardiologie

- Vasculaire procedures via de radiale methode



Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele
radiologie



Perifere
interventie



Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland