


LOWER LEG SUPPORT


Voor een optimale positionering en toegang.

LOWER LEG SUPPORT

Voor een optimale positionering en toegang.

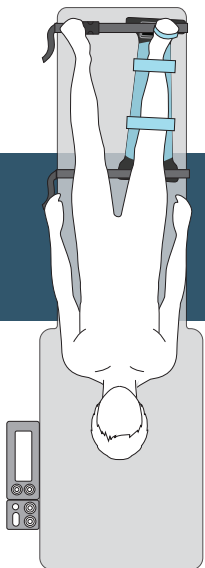

Een complete, klinisch ontworpen oplossing ter ondersteuning van interventies bij perifeer arterieel vaatlijden.

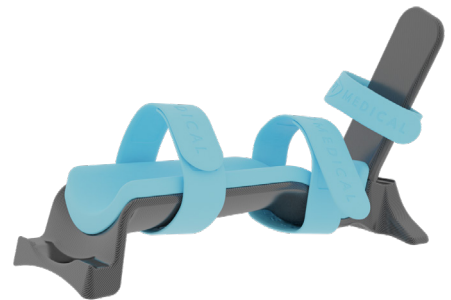

De Lower Leg Support immobiliseert zonder te veel druk het been van de patiënt tijdens de door fluoroscopie geleide behandeling van kritieke ischemie van de ledematen. Het ergonomische ontwerp, dat door de arts wordt gemanoeuvreerd, positioneert het been optimaal voor de procedurevereisten tijdens interventies in de onderste ledematen.

Op de tafelmattas kan het stevig worden vastgezet met twee tafelriemen die eenvoudig rond de vrijdragende tafel en matras worden gewikkeld, zodat het hulpmiddel goed vastzit. De tafelriemen zijn voorzien van gespen met zijdelingse ontgrendeling, waardoor ze snel kunnen worden los- en vastgemaakt. De Lower Leg Support is compatibel met de meeste gangbare tafelmodellen en is geschikt voor C-Arm-beeldvormingssystemen.





Installatie en positionering van de patiënt

De Lower Leg Support houdt de voet comfortabel in een licht plantairgebogen positie en is geschikt voor endo-/exorotatie, zodat de voet in verschillende posities kan worden geplaatst om de beeldvorming te vergemakkelijken.

Dankzij de omkeerbare voetplaat kan het hulpmiddel zowel voor de linker- als de rechtersoet worden gebruikt, wat meer opties biedt voor procedures. De voetplaat kan volledig worden verwijderd om toegang tot de distale slagader, echografie en manipulatie van de voet mogelijk te maken als dat tijdens de procedure nodig is.





Koolstofvezelcomposiet is gebruikt vanwege zijn uitstekende radiolucentie, duurzaamheid en weerstand tegen chemische aantasting door veelgebruikte schoonmaakmiddelen. De Lower Leg Support is licht en gemakkelijk te hanteren, en biedt een eenvoudige, herhaalbare, door één persoon op te zetten oplossing.



Belangrijkste kenmerken en voordelen

- | Beenimmobilisatie
- | Drukbeheersing
- | Zachte riemen
- | Omkeerbare voetplaat
- | Omkeerbare voetplaat
- | Röntgendoorschijnend
- | Comfort voor de patiënt
- | Snelle plaatsing en installatie

Specificaties

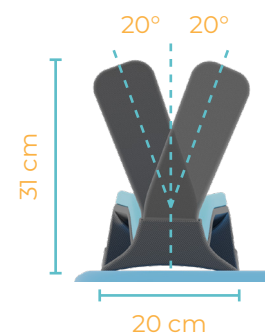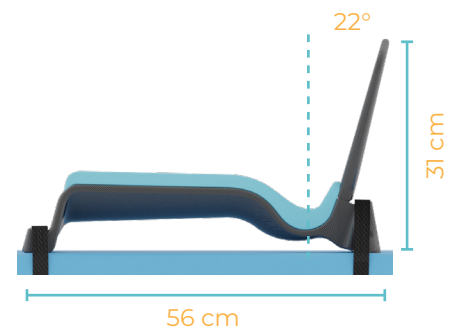


Productgewicht



Comfort voor de patiënt

Verstelbare been- en voetriemen met schuimrubber voelen zacht aan en immobiliseren zonder te veel druk patiënten onder bewuste sedatie.

De Leg Support van koolstofvezel is voorzien van een klinisch ontworpen beenkussen van zacht schuim, dat drukbeheersing biedt aan patiënten die vaak last hebben van pijnlijke zweren.

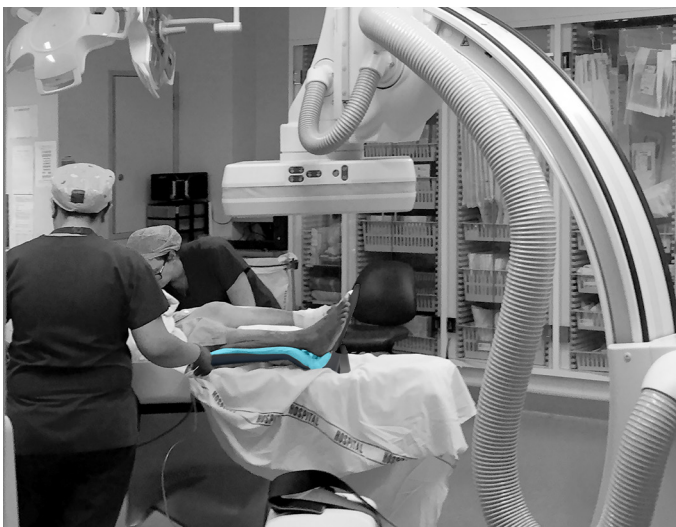

Toepassingen

Interventionele radiologie

- Door fluoroscopie geleide behandeling voor perifeer arterieel vaatlijden

Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele
radiologie



Perifere
interventie



Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland