


PRONE SUPPORT

Voor verbeterd beheer en comfort van de patiënt.

PRONE SUPPORT

Voor verbeterd beheer en comfort van de patiënt.

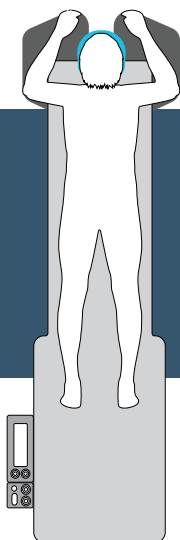

De ideale oplossing voor ondersteuning en beheer van een patiënt in buikligging en een comfortabele positionering van de patiënt tijdens beeldgestuurde procedures.



Dit veelzijdige hulpmiddel biedt ondersteuning voor een patiënt in buikligging tijdens diverse procedures.



Patiëntpositionering

De tweedelige steun biedt optimaal comfort voor de patiënt en het uitvoeren van de procedure, waarbij zowel de armen als het gezicht worden ondersteund.

Het oppervlak van de armsteun is vrijdragend ten opzichte van de beeldvormingstafel, zodat patiënten met uiteenlopende maten en mobiliteitsbereik comfortabel kunnen worden ondersteund. De armen kunnen worden gepositioneerd afhankelijk van de schoudermobiliteit van de patiënt of wat nodig is voor de procedure.



De verhoogde gevoerde gezichtssteun (face support) biedt extra comfort met voldoende ruimte eronder voor patiënten die bij bewustzijn zijn. De hoofdsteun kan ook volledig worden verwijderd indien dit comfortabeler is voor de patiënt of de procedure hierdoor beter kan worden uitgevoerd.



Plaatsing en verstelling

De Prone Support kan eenvoudig onder het matras worden geplaatst met behulp van de basisplaat (base board), zodat deze efficiënt op elke beeldvormingstafel kan worden bevestigd en verwijderd. Deze wordt gedurende de procedure stabiel gehouden door het gewicht van de patiënt. De steun is geschikt voor de meeste C-armbeeldvormingscentra en -tafels.



De gezichtssteun (face support) kan in hoogte en in hoek worden versteld met behulp van de hendelvergrendeling en de duimschroef (thumbscrew), zodat deze geschikt is voor uiteenlopende behoeften van patiënten en procedures.



Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Röntgendoorschijnend
- Hoogte- en hoekverstelling van hoofdsteun
- Gevoerde gezichtssteun (face support)
- Veelzijdige armposities
- Geschikt voor verschillende maten van patiënten
- Snelle plaatsing en installatie
- Geschikt voor C-armtafels

Specificaties



78 cm



*De in hoogte verstelbare hoofdsteun heeft een verticaal bereik van 85 mm.

2,3 kg Productgewicht

Toepassingen

- Insertie bij percutane nefrostomie
- Nier- en longbiopsie
- Vertebroplastiek/kyfoplastiek
- Percutane embolisatie van de heupzenuw
- Myelogram
- Discogram



Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele
radiologie



Fabrikant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland